

TRANSFERT SUR CARTE FTA (FAST TECHNOLOGY ANALYSIS) D'UN PRÉLÈVEMENT DE POUMON

1. LE MATÉRIEL



Pochette plastique



Carte FTA fermée



Carte FTA ouverte



Carte FTA renseignée

2. MODE OPÉRATOIRE



1

- Prélever un morceau de parenchyme à la limite zone saine / zone lésée



2

- Tamponner la tranche de section 3 ou 4 fois sur le cercle



3

- Laisser sécher avant de refermer et mettre sous pochette plastique

3. INTÉRÊT / ANIMAUX À TRAITER



- ▶ Pour une meilleure conservation des acides nucléiques sans impératif de délai d'envoi
- ▶ Prélèvement pour analyse PCR : recherche de virus et bactéries respiratoires.
- ▶ Tissu à prélever : intermédiaire entre zone saine et zone lésée.

4. CONSERVATION / TRANSPORT



- ▶ Remplir le document d'accompagnement.
- ▶ Envoi sous enveloppe en courrier simple.

POUR VOIR
LE GESTE EN VIDÉO,
flashez le QRcode



zoetis