

# TRANSFERT SUR CARTE FTA (FAST TECHNOLOGY ANALYSIS) D'UN PRÉLÈVEMENT DE POUMON



## 1. LE MATÉRIEL



Pochette plastique



Carte FTA fermée



Carte FTA ouverte



Carte FTA renseignée

## 2. MODE OPÉRATOIRE





1

- Prélever un morceau de parenchyme à la limite zone saine / zone lésée



2

- Tamponner la tranche de section 3 ou 4 fois sur le cercle

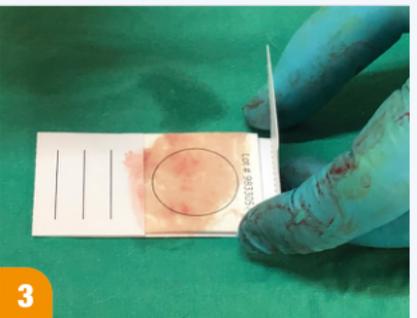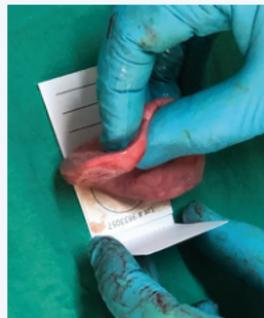

3

- Laisser sécher avant de refermer et mettre sous pochette plastique

## 3. INTÉRÊT / ANIMAUX À TRAITER



- ▶ Pour une meilleure conservation des acides nucléiques sans impératif de délai d'envoi
- ▶ Prélèvement pour analyse PCR : recherche de virus et bactéries respiratoires.
- ▶ Tissu à prélever : intermédiaire entre zone saine et zone lésée.

## 4. CONSERVATION / TRANSPORT



- ▶ Remplir le document d'accompagnement.
- ▶ Envoi sous enveloppe en courrier simple.

POUR VOIR  
LE GESTE EN VIDÉO,  
flashez le QRcode



**zoetis**